

## Prélèvement d'échantillons de poils



1

- Mains propres + animal propre .
- Absolument éviter des poils des autres animaux.
- Arracher les poils dans le sens inverse de la pousse.



2

- 50 – 100 racines.



3

- Décoller la feuille adhésive.
- Mettre les racines des poils dans le carton ouvert.



4

- Coller et couvrir les poils avec la feuille adhésive.
- Appuyer sur le bord de la feuille adhésive.



5

- Couper les poils qui dépassent le bord.
- Fermer le carton avec la languette.



6

- Coller l'autocollant BDTA sur le carton et contrôler la marque auriculaire de l'animal.
- Absolument éviter de coller l'autocollant sur le code pré-imprimé du carton.
- Remplir la commande en ligne et imprimer le formulaire de commande.

Envoyer l'échantillon ainsi que le formulaire de commande dans une enveloppe standard à l'adresse suivante:

**Qualitas AG, Sélection génomique, Chamerstrasse 56, 6300 Zoug**